

## Обновление Inobitec DICOM Server (PACS) с поддержкой БД PostgreSQL с версии 1.0 до 1.4 (Windows)

**Данное руководство предназначено для системного администратора**

1. Добавить в переменную окружения **PATH** путь к бинарным компонентам PostgreSQL (например, «C:\Program Files\PostgreSQL\9.4\bin»).
2. В каталоге *scripts* отредактировать файл *init.bat*. Установить значения:  
**POSTGRES\_USER** – администратор PostgreSQL (имя пользователя, указанное во время конфигурации БД);  
**POSTGRES\_PASS** – пароль администратора PostgreSQL (пароль пользователя, указанный во время конфигурации БД);  
**POSTGRES\_HOST** – сетевой адрес компьютера, на котором развёрнут сервер PostgreSQL;  
**POSTGRES\_PORT** – порт PostgreSQL сервера;  
**PACS\_USER** – имя нового пользователя-владельца схемы;  
**PACS\_PASS** – пароль для нового пользователя-владельца схемы;  
**PACS\_DICOM\_PORT** – dicom-порт PACS-сервера;  
**PACS\_HTTP\_PORT** – http-порт PACS-сервера;  
**PACS\_AE\_TITLE** – AE Title PACS-сервера;  
**WEB\_ADMIN\_USER** – имя пользователя WebAdmin;  
**WEB\_ADMIN\_PASSWORD** – пароль пользователя WebAdmin;  
**DEST\_DIR** – каталог, в который установлены компоненты PACS-сервера. **В пути использовать прямые слэши («/»).**
3. Если сервер PostgreSQL установлен на компьютер под управлением ОС Linux, следует отредактировать файл *pacr.ini* (по аналогии с файлом *init.bat*).
4. Отредактировать существующий файл *srv\_settings.ini*, находящийся в *DEST\_DIR\conf*: следует удалить пробелы между названием параметра и символом равенства «=», а также между символом равенства «=» и значением параметра.
5. От имени администратора выполнить сценарий *update\_pacs.bat*. После завершения работы сценария должно быть выведено сообщение «Updating PACSServer completed».
6. На том же компьютере, где установлен сервер PostgreSQL запустить сценарий обновления схемы БД PACS-сервера *update\_database.bat* для ОС Windows или *update\_database.sh* для ОС Linux.
7. Для запуска PACS-сервера вручную выполнить в консоли от имени администратора команду

```
> sc start PACSServer
```

либо запустить службу «PACSServer» посредством оснастки (службы) Windows ОС.